

Ihr hochwertiger Zahnersatz wurde von einem qualifizierten Team - Ihrem Zahnarzt und Ihrem Zahntechniker - nach neuesten funktionellen Erkenntnissen erstellt. Als Prothesenkunststoff wurde Versyo®.com verarbeitet. Dieses Material zeichnet sich durch sehr gute Biokompatibilität aus: es enthält keine sensibilisierenden Methylmethacrylate und Peroxide. In klinischen Tests wurde die hervorragende Mundverträglichkeit bestätigt.



Warum Prothesenpflege?

PFLEGEPASS

für Ihre Prothesen

Damit Sie lange Zeit mit Ihrem Zahnersatz glücklich und zufrieden sein können, müssen Sie ihn täglich sorgfältig pflegen. Da Prothesen - wie die eigenen Zähne auch - Bakterien besiedelt werden, bilden sich leicht Zahnbeläge, die nicht nur unästhetisch sind, sondern oft zur Erkrankung der Mundschleimhaut führen. Die Entstehung solcher Zahn- bzw. Prothesenbeläge kann durch Ihre Pflege eingedämmt bzw. vollständig verhindert werden. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Prothesenpflege.



Wie pflegen Sie richtig?

Reinigen Sie Ihren Zahnersatz nach jeder Mahlzeit gründlich unter fließendem Wasser, am besten über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. So vermeiden Sie, dass Ihr Zahnersatz zerbricht, falls er Ihnen aus der Hand gleitet. Verwenden Sie zur Reinigung am besten eine Prothesenbürste oder einfach eine weiche Zahnbürste in Verbindung mit Zahnpasta. Achten Sie besonders auf die Zahnzwischenräume, die Flächen, die dem Gaumen anliegen und jene Teile, die Kontakt mit dem Restgebiss im Munde haben. Bürsten Sie sorgfältig einige Minuten. Vergessen Sie nicht auch das Restgebiss im Mund zu bürsten. Die Prothese nie mit heißem Wasser reinigen.



5 Goldene Regeln für Prothesenträger

- Die Prothese bleibt formstabil, Ihre Kiefer können sich jedoch verändern. Deshalb muss der einwandfreie Sitz Ihres Zahnersatzes regelmäßig, ca. halbjährlich, kontrolliert werden, auch wenn beim Tragen keine Schwierigkeiten auftreten. Gehen Sie daher regelmäßig zum Zahnarzt.
- Tägliche Prothesenpflege erhält die Kaufunktion Ihres Zahnersatzes und sorgt für Ihr gutes Aussehen.
- Ätzende Flüssigkeiten (z.B. Haushaltsreiniger oder lösende Mittel) dürfen unter keinen Umständen zur Reinigung angewendet werden.
- Versuchen Sie nie, Ihren Zahnersatz selbst zu reparieren
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Zahnarztes er berät Sie in allen Fragen rund um Ihre Zähne und Ihren Zahnersatz.



Zahntechnikermeister
WILFRIED TREPELS
-ZAHNTECHNISCHES LABOR-

Mehr Infos auch im Internet unter: www.versyo.com

